

다양함을 표준화하는 IGRA 검사

체외진단용 의료기기 잠복·활동성 결핵 진단 검사



T-SPOT[®].TB

T-SPOT.TB는
세포의 수치를 표준화하여 검사하는
유일한 IGRA입니다.

전혈로부터 말초혈액단핵구만을
「분리-세척-표준화」한 후,
동일한 출발선에서 항원 반응을 개시하므로,
면역 기능과 채혈 상태에 따른 개인차를 제거하여
신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.



“민감도” 및 “특이도”에 대한 임상시험 결과

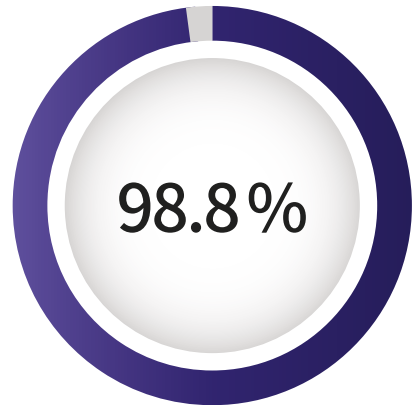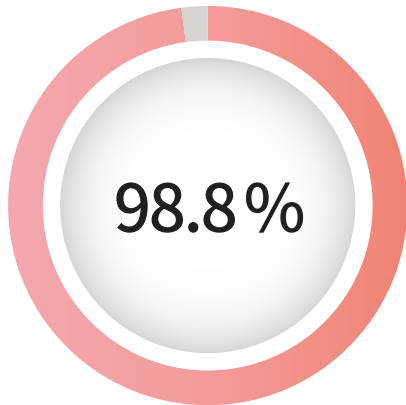

[민감도]

결핵균에 감염된 피험자(면역억제환자 포함)로부터 얻은 87개의 검체를 T-SPOT.TB로 평가한 결과, 98.8% (86/87)의 분석적 민감도를 나타냈습니다. (95% 신뢰한계 90.8% – 99.9%)¹

[특이도]

결핵균 감염 위험이 낮은 피험자로부터 병력과 신상정보를 확인하여 얻은 적합한 검체를 T-SPOT.TB로 평가한 결과 98.8% (86/87)의 분석적 특이도를 나타냈습니다. (95% 신뢰한계 95.1% – 100%)¹

¹식품의약품안전처 품목허가 성능 정보

● 검사정보 및 채혈량

검사정보

검사명	결핵균특이항원 자극 인터페론-감마 검사
검사원리	ELISPOT법
검체용기	헤파린 튜브
검체보관	실온 (18~25°C)
검사개시 전, 검체 보관 가능 시간	채혈 후 32시간*
급여정보	누-602 D6020
급여상대가치점수	522.06

채혈량



* T-Cell Xtend® 사용 시 (T-Cell Xtend®는 검사기관에서 검사 개시 전에 첨가합니다)

● 검사수탁 문의

검사 의뢰에 대해서는 다음 기관에 문의하여 주십시오.



씨젠의료재단 | 서울시 성동구 천호대로 320
Tel: (02)2218-9273 | FAX: (02)2214-5809



이원의료재단 | 인천광역시 연수구 하모니로 291
Tel: (032)210-2100 | FAX: (032)210-2233

● 수입/판매기관



SG 메디칼 | 서울시 송파구 오금로 13길 3 -11 한길빌딩 2~3층
Tel: (02)2240-7040~3 | FAX: (02)2240-7099

* 의원급 의료기관(검체 검사 수탁기관 포함)의 경우



경일 메디칼 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스 1A동 1104호
Tel: (031)628-1900 | FAX: (031)628-1905

* 병원급 의료기관의 경우